

Multi-Gyn Kompressen

- Sofortige Erleichterung bei Beschwerden im Intimbereich
- Große Linderungswirkung bei Gewebeschäden, Juckreiz und Reizungen
- Lassen Schwellungen abklingen und verhindern Infektionen
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess
- Einzigartige Anwendung durch schützende Kompressen
- Ideal auch während der Schwangerschaft und nach der Entbindung

Hinweis

Das Gel auf den Multi-Gyn Kompressen kann je nach Erntezeit der Pflanzen durchsichtig, trüb, milchig oder gelblich gefärbt sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Anwendungsgebiete:

- Zur äußerlichen Anwendung im Intimbereich: Damm, Vulva, Schamlippen und Anus.
- Verschaffen sofortige Erleichterung bei Beschwerden wie z.B. Juckreiz, Schwellungen und Reizungen.
- Für eine effektive Behandlung äußerer Analfissuren, Hämorrhoiden und Gewebeverletzungen
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess und verhindern Infektionen durch geburtsbedingte Gewebeschädigungen (Dammriss oder -schnitt, Überdehnungen)
- Zur Behandlung von Irritationen, die durch Reibung (Textilien, Sport), Binden, allergische Reaktionen, Geschlechtsverkehr oder Verwendung von aggressiven Hygieneprodukten entstanden sind.

Multi-Gyn Kompressen wurden entwickelt, um bei äußeren Beschwerden im Intimbereich maximale Erleichterung zu schaffen. Auf jeder Komresse ist ein bio-aktives Gel aufgetragen. Dieses natürliche Gel basiert auf dem patentierten 2QR-Komplex, der die Bakterienentwicklung hemmt und Infektionen verhindert. Die Außenseite der Komresse ist mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen, die optimale Bedingungen für den natürlichen Heilungsprozess schafft. Zudem wird so die Verunreinigung der Wäsche durch das Gel verhindert. Die schützende Komresse kann berührungslos im Intimbereich (anal und vaginal) platziert werden und fühlt sich weich und angenehm an.

Multi-Gyn Kompressen sind ideal zur Prävention und Behandlung kleinerer Gewebeschäden wie Reizungen, Ausschläge, überdehntes Gewebe, kleine Risse, Fissuren und Hämorrhoiden. Dieses Produkt ist äußerst wirksam, sicher und natürlich und auch deshalb besonders geeignet, um Beschwerden während der Schwangerschaft und nach der Entbindung zu lindern. Multi-Gyn Kompressen sind ein Medizinprodukt Klasse I mit europäischer Zulassung.

Anwendung:

Verwenden Sie Multi-Gyn Kompressen, wann immer Sie möchten, wenn Sie Beschwerden wie Gewebeschäden, Juckreiz, Empfindlichkeit, Reizungen oder Schwellungen spüren oder vermeiden möchten. Briefchen öffnen, Komresse entfalten und mit der gelgetränkten Seite auf die betroffene Stelle auflegen. Lassen Sie die Komresse so lange Sie wollen – mindestens aber 10 Minuten - einwirken. Damit die Komresse an ihrem Platz bleibt, empfehlen wir, während der Anwendung enge Unterwäsche zu tragen. Wiederholen Sie die Behandlung mindestens zwei Mal täglich, bis Sie Linderung verspüren.

Multi-Gyn Kompressen innerhalb einer Behandlungsperiode nicht länger als 30 Tage ununterbrochen verwenden, damit sich die Scheidenflora ohne weitere Anwendungen stabilisieren kann.

Beschwerden im äußeren Intimbereich (anal und vaginal) sind häufiger als Sie denken.

Viele Menschen kennen das Problem: Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, kleinere Gewebeverletzungen, Schwellungen und Hämorrhoiden.

Diese Beschwerden können viele verschiedene Ursachen haben, wie z.B.: mechanische Reibung (durch Textilien oder durch Sport), Menstruation, Geschlechtsverkehr, Infektionen, alters- oder hormonbedingte Veränderung des Gewebes, Verwendung von zu aggressiven Hygieneprodukten, Nebenwirkungen von Medikamenten oder chronische Verstopfung – übrigens eine häufige Erscheinung auch in der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Während dieser Phase ist der Druck auf den gesamten Intimbereich größer als üblich. Dieser Druck verursacht häufig kleine Risse im Gewebe (Analfissuren) oder anschwellende Gefäße (Hämorrhoiden). Während der Entbindung tritt zudem eine Überdehnung des Gewebes auf, die oft Risse und Verletzungen (z.B. Dammriss, Episiotomie) zur Folge hat. Diese kleinen Verletzungen können sehr unangenehm sein. Wussten Sie dass zwei von drei Frauen während der Schwangerschaft und nach der Entbindung an solchen Beschwerden leiden? Zudem treten diese Probleme bei den meisten Müttern immer wieder auf. Multi-Gyn Kompressen stellen eine wirkungsvolle und natürliche Lösung für alle soeben genannten Beschwerden dar, für Mann und Frau.

Wie Multi-Gyn Kompressen wirken

Das bio-aktive Gel der Kompressen basiert auf dem patentierten 2QR-Komplex. Diese natürliche Substanz wird aus Arzneipflanzen gewonnen und besteht aus Polysaccharid-Molekülen.

Das Gel hat die einzigartige Fähigkeit, die Anlagerung schädlicher Bakterien zu verhindern und neutralisiert diese Bakterien auf natürliche Weise sehr wirkungsvoll. Dieser natürliche Hemmeffekt ist vollkommen sicher und unschädlich, da er nicht auf toxischen Substanzen oder aggressiven Chemikalien basiert und somit keine negativen Nebenwirkungen aufweist. Zusätzlich zu diesem Schlüsseleffekt, schädliche Bakterien zu hemmen, unterstützen Multi-Gyn Kompressen das natürliche Reparatursystem des Gewebes und verbessern den Allgemeinzustand der Schleimhäute. Diese Wirkung wird durch die speziell laminierten und nicht absorbierenden Kompressen erzielt, die eine ideale Voraussetzung für den natürlichen Heilungsprozess schaffen.

Bestandteile:

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Glycerin, Laureth-9, Xanthan Gum, Lactic acid, Aldioxa, Caprylyl Glycol
*2QR: patentierte bio-aktive Polysaccharide, durch Molekularfilterverfahren aus dem Gel des inneren Blattes des Aloe Barbadosis Miller gewonnen.

Bitte beachten!

- Multi-Gyn Kompressen sind vollkommen sicher; es gibt keine Einschränkungen bei der Anwendung. Es treten keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln auf.
- Bei anhaltenden oder häufig wiederkehrenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt befragen.
- Allergische Reaktionen auf die Bestandteile von Multi-Gyn Kompressen kommen nur sehr selten vor. Sollten Sie allergisch gegen bestimmte pflanzliche Stoffe sein, empfehlen wir Ihnen, eine kleine Menge Multi-Gyn Kompressen auf die Innenseite des Unterarms aufzutragen. Treten danach Juckreiz und Rötungen auf, sind Sie wahrscheinlich gegen einen der Bestandteile von Multi-Gyn Kompressen allergisch. Wir empfehlen Ihnen, Multi-Gyn Kompressen dann nicht zu verwenden.

Multi-Gyn Kompressen enthalten nur natürliche Inhaltsstoffe

Das bio-aktive Gel der Multi-Gyn Kompressen ist ein natürliches Produkt auf der Basis des bio-aktiven 2QR-Komplexes. Es enthält weder Duftstoffe noch Inhaltsstoffe tierischer Herkunft. Es enthält keine aggressiven Chemikalien, Konservierungsstoffe oder Hormone und ist sicher und unschädlich.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Multi-Gyn Kompressen weisen keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln auf.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Anwendung der Multi-Gyn Kompressen während Schwangerschaft und Stillzeit ist unbedenklich.

Multi-Gyn ist eine Serie natürlicher Produkte zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Beschwerden im Intimbereich.

Bio-aktive Multi-Gyn Produkte nehmen eine einzigartige Stellung in der persönlichen Intimpflege und natürlichen Selbstmedikation ein. Alle Multi-Gyn Produkte enthalten weder Konservierungsstoffe noch Bestandteile tierischen Ursprungs oder toxische Substanzen. Sie sind zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet und besitzen keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln.

Weitere Multi-Gyn Produkte für den Intimbereich:

Multi-Gyn FemiWash

Bio-aktiver Mikroschaum für die tägliche Hygiene. Milde und seifenfreie Intimwaschlotion für das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich. 100ml, PZN: 4952660

Multi-Gyn LiquiGel

Bio-aktives Pflegegel für Wohlbefinden im Intimbereich. Lindert Trockenheit und Irritationen sofort durch natürliche Befeuchtung, 60ml, PZN: 4952654

Multi-Gyn FloraPlus

Bio-aktives, prebiotisches Vaginalgel zur Vorbeugung und Behandlung von Scheidenpilzproblemen. Fördert aktiv die körpereigenen Milchsäurebakterien und stärkt die Scheidenflora. In praktischen Einzel-Applikatoren, 5 x 5ml, PZN: 6916208

Multi-Gyn ActiGel

Bio-aktives Gel zur Vorbeugung und Behandlung von bakterieller Vaginose und den damit zusammenhängenden Problemen wie Ausfluss, Geruch, Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, Rötungen und Wundheit. 50ml, PZN: 4952648

Multi-Gyn Vaginaldusche

Ergonomisch gestaltete Vaginaldusche zur Vaginalhygiene, Vorbeugung und Behandlung von vaginalen Infektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen. PZN: 4952737

Multi-Gyn Brausetabletten

Zur Herstellung einer bio-aktiven Vaginalspüllösung. Sanfte Spüllösung mit natürlichen Inhaltsstoffen zur intensiven Vaginalhygiene. Bei vaginalen Beschwerden, vaginalen Infektionen und für deren Vorbeugung. 10 Tabletten, PZN: 4952743

Multi-Gyn Produkte sind in jeder Apotheke erhältlich

Weitere Informationen unter www.multi-gyn.de

Alleinvertrieb in Deutschland:
Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
D-82234 Oberpaffenhofen
Tel. 08153 / 90 877 - 0
Fax. 08153 / 90 877 - 66
info@ardomedical.de
www.ardomedical.de

Alleinvertrieb in Deutschland

Ardo medical GmbH,
Argelsrieder Feld 10,
82234 Oberpaffenhofen



Hersteller:
BioClin BV, Delftsepark 55,
2628 XI, Delft, Niederlande