

Multi-Gyn® VAGINALDUCHE

Multi-Gyn®

Eigenschaften:

- Ist frauenfreundlich, ergonomisch und kann in jeder Position angewendet werden
- Hat einen optimalen Spüleeffekt, da die Flüssigkeit seitwärts wie vorne ausdringt
- Das spezielle Silikonventil verhindert ein Zurücksaugen und eine Kontamination der Duschlösung
- Das Silikonventil verhindert ebenfalls einen überhöhten Druck in der Vagina oder ein Rinnen der Flasche
- Der weiche und elastische Applikator in Kombination mit dem flexiblen Winkel der Flasche gewährleistet einen optimalen Anwender-Komfort
- Die weiche Flasche kann mit einer Hand zusammengedrückt werden
- Ist perfekt für die Kombination mit den Multi-Gyn Brausetabletten, kann aber auch mit anderen Duschlösungen verwendet werden

Das Design

Die Multi-Gyn Vaginaldusche hat ein europaweit registriertes, ergonomisches Design. Dank der Einzigartigkeit des Designs und der Funktionalität ist es die einzige Vaginaldusche mit dem Status Medizinprodukt Klasse I.

Wofür verwenden Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche?

- für die generelle Hygiene
- für die Linderung von übermäßigem Ausfluss, unangenehmen Geruch, Juckreiz, Irritationen und Brennen
- für die Vorbeugung von vaginalen Infektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen

Gute und vor allem richtige vaginale Hygiene ist sehr wichtig für eine gesunde Vagina, speziell bei sexueller Aktivität, während der Menstruation und bei vaginalen Beschwerden und/oder Infektionen. Durch das Duschen werden Zellrückstände und Absonderungen, welche sich in den Taschen neben dem Gebärmutterhals ansammeln, herausgespült. Zudem wird der Gebärmutterhals ebenfalls gereinigt. Bei einer vaginalen Infektion werden auch die schädlichen Keime mit den Zellrückständen herausgespült. Die Multi-Gyn Vaginaldusche ist ein Medizinprodukt für die Verhütung von vaginalen Infektionen wie bakterielle- und Candida-Infektionen und für die Unterstützung der spezifischen Behandlung solcher Krankheiten.

Wie häufig wenden Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche an?

Die Häufigkeit der Anwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche hängt sehr stark vom individuellen

Zustand der Vagina (einige Frauen sind anfälliger für Infektionen als andere), vom Lebensstil, von der sexuellen Aktivität (ohne Gebrauch von Kondomen), Menstruation, etc., ab.

Für eine gute vaginale Hygiene reicht üblicherweise eine Anwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche in der Woche. Wenn ein Bedürfnis für zusätzliche vaginale Hygiene besteht, zum Beispiel während der Menstruation oder für die Verhütung von vaginalen Beschwerden, wird eine Anwendung 3 mal wöchentlich empfohlen (jeden 2. Tag).

Für die Linderung von vaginalen Beschwerden und für die Unterstützung einer Therapie von vaginalen Infektionen wird eine Anwendung 2 mal täglich während 5 Tagen empfohlen.

Im Falle von andauernden Beschwerden benachrichtigen Sie immer Ihren Arzt.

Kann die Multi-Gyn Vaginaldusche während der Schwangerschaft verwendet werden?

Nach heutigem Wissensstand kann die Multi-Gyn Vaginaldusche auch während einer normalen Schwangerschaft ohne Probleme angewendet werden. Dank des einzigartigen, registrierten Designs, kann kein Druck in der Vagina aufgebaut werden, was für die Sicherheit von grosser Bedeutung ist. Möchten Sie schwanger werden, wird von einer Anwendung in den ersten 24 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr abgeraten. Eine Vaginaldusche kann nicht als Verhütungsmittel verwendet werden.

Was müssen Sie beachten?

Die Multi-Gyn Vaginaldusche sollte nie ausgekocht werden oder in heisses Wasser gelegt werden, da sie sich dann irreparabel verformt. Möchten Sie die Dusche desinfizieren, dann sollten Sie verdünntes Javex verwenden. Sollten die Rippen schmutzig werden, empfehlen wir eine alte Zahnbürste zur Reinigung zu verwenden.

Multi-Gyn FloraPlus: Vorbeugung und Behandlung von Scheidenpilzproblemen. PZN: 6916208

Multi-Gyn ActiGel: Vorbeugung und Behandlung von vaginalen Problemen. PZN: 4952648


Multi-Gyn LiquiGel: Bio-aktives Pflegegel für Wohlbefinden im Intimbereich. Bei Trockenheit und Irritationen. PZN: 4952654

Multi-Gyn FemiWash: Milder und seifenfreier Mikroschaum für das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich. PZN: 4952660

Multi-Gyn Kompressen: Kompressen bei Gewebeschäden im Intimbereich. PZN: 4867635

Wie wenden Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche an?

Diese Vaginaldusche kann in verschiedenen Positionen verwendet werden: auf der Toilette sitzend, in der Badewanne liegend oder unter der Dusche stehend. Es ist wichtig, dass die Duschflüssigkeit während

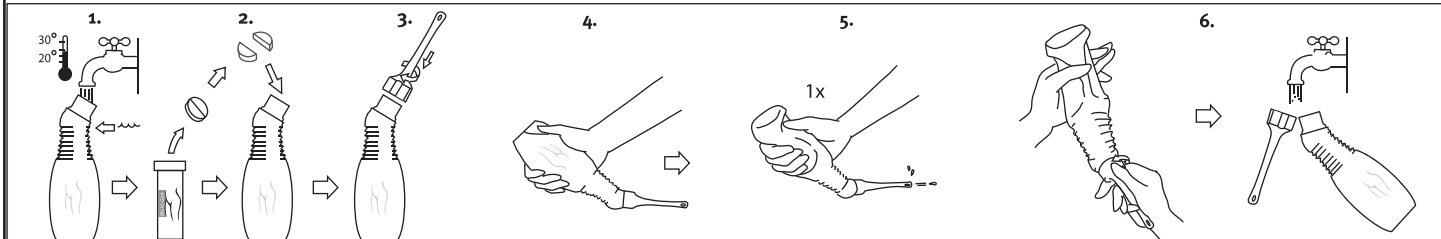

1. Füllen Sie die Flasche bis zum oberen Ende der Rippen mit lauwarmem Wasser.
2. Geben Sie eine Brausetablette in die Flasche.
3. Schrauben Sie den Applikator auf die Flasche und warten Sie, bis sich die Brausetablette vollständig aufgelöst hat.

4. Führen Sie den Applikator vorsichtig in die Vagina ein, so dass es für Sie bequem ist. Stellen Sie sicher, dass die Duschflüssigkeit ungehindert abfließen kann.
5. Drücken Sie die Flasche 1 mal vorsichtig, aber ganz durch, um die Vagina zu reinigen.

6. Nach Gebrauch spülen Sie die Flasche und den Applikator mit sauberem, warmem Wasser kurz aus.

Alleinvertrieb in Deutschland:

Ardo medical GmbH,
D-82234, Oberpfaffenhofen



Manufactured by:

BioClin BV, Delftepark 55,
2628 XJ, Delft, The Netherlands

WWW.MULTI-GYN.DE



Multi-Gyn® BRAUSETABLETTE FÜR DIE VAGINALDUCHELÖSUNG

Multi-Gyn®

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Dosierung: 1 Tablette für eine Spülung mit der Multi-Gyn Vaginaldusche
- Natürliche Inhaltsstoffe ohne Konservierungs- oder Duftstoffe
- Unterstützt das Wachstum der Milchsäurebakterien und optimiert den natürlichen Zustand der Vagina
- Hilft unangenehmen Geruch vorzubeugen und übermäßigem Ausfluss einzudämmen
- Hilft vaginalen Beschwerden vorzubeugen und unterstützt die medizinische Behandlung von vaginalen Infekten
- Kleine Verpackung. Einfach und diskret zum mitnehmen
- Sanft, nicht toxisch, keine schädlichen Nebenwirkungen

In Kombination mit der Multi-Gyn Vaginaldusche bieten die Multi-Gyn Brausetabletten die ideale Lösung für eine optimale Intimhygiene, um vaginalen Infekten und vaginalen Beschwerden wie Juckreiz, Brennen oder unangenehmen Ausfluss und/oder Geruch vorzubeugen oder für die Unterstützung der Behandlung von vaginalen Infekten.

Sanftes Reinigen mit natürlichen Inhaltsstoffen

Die Multi-Gyn Brausetabletten bestehen aus konzentrierten natürlichen Inhaltsstoffen und enthalten keine Konservierungsmittel. Mit den Multi-Gyn Brausetabletten entsteht eine optimale Spüllösung für eine sanfte und wirksame Reinigung der Vagina.

Multi-Gyn Brausetabletten enthalten Stoffe, welche das Wachstum der Milchsäurebakterien unterstützen und einen Extrakt der Aloe-Pflanze, welcher den Zustand des Gewebes optimiert.

Inhaltsstoffe: Natrium Bicarbonate, Citric Acid, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Powder, Lactose, Ascorbic Acid.

Wofür wenden Sie die Multi-Gyn Brausetabletten an?

- für die generelle Hygiene
- für die Linderung von übermäßigem Ausfluss, unangenehmen Geruch, Juckreiz, Irritationen und Brennen
- für die Vorbeugung von vaginalen Infektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen

Im Falle von andauernden Beschwerden benachrichtigen Sie bitte immer Ihren Arzt.

Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?

Multi-Gyn Brausetabletten haben keine schädlichen Nebenwirkungen. Sie enthalten weder Hormone noch Konservierungsstoffe, Duftstoffe oder toxische Substanzen.

Achtung: Brausetablette weder oral noch vaginal einführen!

Können Multi-Gyn Brausetabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden?

Multi-Gyn Brausetabletten können ohne Probleme während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Alleinvertrieb in Deutschland:

Ardo medical GmbH,
D-82234, Oberpfaffenhofen



Manufactured by:

BioClin BV, Delftepark 55,
2628 XJ, Delft, The Netherlands

WWW.MULTI-GYN.DE

