



## Eigenschaften:

- Ist frauenfreundlich, ergonomisch und kann in jeder Position angewendet werden
- Hat einen optimalen Spüleffekt, da die Flüssigkeit seitwärts wie vorne ausdringt
- Das spezielle Silikonventil verhindert ein Zurücksaugen und eine Kontamination der Duschlösung
- Das Silikonventil verhindert ebenfalls einen überhöhten Druck in der Vagina oder ein Rinnen der Flasche
- Der weiche und elastische Applikator in Kombination mit dem flexiblen Winkel der Flasche gewährleistet einen guten Anwender-Komfort
- Die weiche Flasche kann mit einer Hand zusammengedrückt werden
- Ist für die Kombination mit den Multi-Gyn Brausetabletten gedacht, kann aber auch mit anderen Duschlösungen verwendet werden

## Das Design

Die Multi-Gyn Vaginaldusche hat ein europaweit registriertes, ergonomisches Design. Dank dieses Designs und der Funktionalität ist es eine Vaginaldusche mit dem Status Medizinprodukt Klasse I.

## Wofür verwenden Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche?

- für die generelle Hygiene
- bei übermäßigem Ausfluss, unangenehmem Geruch, Juckreiz, Irritationen und Brennen
- für die Vorbeugung von vaginalen Infektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen


Gute und vor allem richtige vaginale Hygiene ist sehr wichtig für eine gesunde Vagina, speziell bei sexueller Aktivität, während der Menstruation und bei vaginalen Beschwerden und/oder Infektionen. Durch das Duschen werden Zellrückstände und Absonderungen, welche sich in den Taschen neben dem Gebärmutterhals ansammeln, herausgespült. Zudem wird der Gebärmutterhals gereinigt. Bei einer vaginalen Infektion werden auch schädliche Keime mit den Zellrückständen herausgespült.

## Wie häufig wenden Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche an?

Die Häufigkeit der Anwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche hängt sehr stark vom individuellen Zustand der Vagina (einige Frauen sind anfälliger für Infektionen als andere), vom Lebensstil, von der sexuellen Aktivität (ohne Gebrauch von Kondomen), Menstruation, etc., ab.

## Wie wenden Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche an?

Diese Vaginaldusche kann in verschiedenen Positionen verwendet werden: auf der Toilette sitzend, in der Badewanne liegend oder unter der Dusche stehend. Es ist wichtig, dass die Duschflüssigkeit während dem Duschen ungehindert abfließen kann. Finden Sie die für sich bequemste Position.

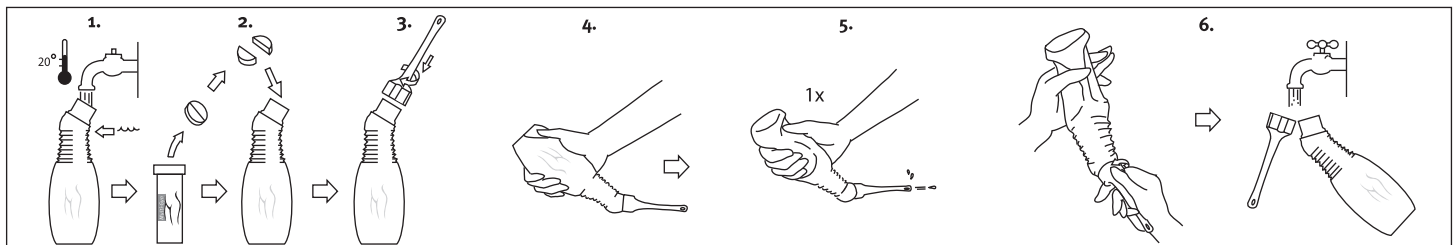

1. Füllen Sie die Flasche bis zum oberen Ende der Rippen mit lauwarmen Wasser.
2. Geben Sie eine Brausetablette in die Flasche.
3. Schrauben Sie den Applikator auf die Flasche und warten Sie, bis sich die Brausetablette vollständig aufgelöst hat.

4. Führen Sie den Applikator vorsichtig in die Vagina ein, so dass es für Sie bequem ist. Stellen Sie sicher, dass die Duschflüssigkeit ungehindert abfließen kann.
5. Drücken Sie die Flasche 1 mal vorsichtig, aber ganz durch, um die Vagina zu reinigen. Die Flasche muss nicht vollständig entleert werden.

6. Nach Gebrauch spülen Sie die Flasche und den Applikator mit sauberem, warmen Wasser kurz aus.

Alleinvertreib in Deutschland:  
Ardo medical GmbH,  
D-82234, Oberpfaffenhofen



Hersteller:  
BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ, Delft, Niederlande

WWW.MULTI-GYN.DE



# Multi-Gyn® BRAUSETABLETLEN FÜR DIE VAGINALDUSCHELÖSUNG



## Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Dosierung: 1 Tablette für eine Spülung mit der Multi-Gyn Vaginaldusche
- Mit natürlichen Inhaltsstoffen ohne Konservierungs- oder Duftstoffe
- Unterstützt das Wachstum der Milchsäurebakterien und optimiert den natürlichen Zustand der Vagina
- Hilft Vaginalbeschwerden vorzubeugen und unterstützt die medizinische Behandlung von vaginalen Infekten
- Kleine Verpackung. Einfach und diskret zum mitnehmen
- Sanft, ohne aggressive Chemikalien

In Kombination mit der Multi-Gyn Vaginaldusche bieten die Multi-Gyn Brausetabletten einen Ansatz für eine optimale Intimhygiene, um vaginalen Infekten und vaginalen Beschwerden wie Juckreiz, Brennen oder unangenehmen Ausfluss und/oder Geruch vorzubeugen oder für die Unterstützung der Behandlung von vaginalen Infekten.

## Sanftes Reinigen mit natürlichen Inhaltsstoffen

Die Multi-Gyn Brausetabletten beinhalten konzentrierte natürliche Inhaltsstoffe und enthalten keine Konservierungsmittel. Mit den Multi-Gyn Brausetabletten entsteht eine sanfte Spüllösung für eine Reinigung der Vagina.

**Inhaltsstoffe:** Natrium Bicarbonate, Citric Acid, Aloe Barbadosis (Aloe Vera) Powder, Lactose, Ascorbic Acid.

## Wofür wenden Sie die Multi-Gyn Brausetabletten an?

- für die generelle innere Vaginalhygiene
- für die Linderung von übermäßigem Ausfluss, unangenehmem Geruch, Juckreiz, Irritationen und Brennen
- für die Vorbeugung von vaginalen Infektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen

*Im Falle von andauernden Beschwerden benachrichtigen Sie bitte immer Ihren Arzt.*

## Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?

Multi-Gyn Brausetabletten haben keine bekannten Nebenwirkungen (eine allergische Reaktion ist grundsätzlich möglich). Sie enthalten weder Hormone noch Konservierungsstoffe, Duftstoffe oder toxische Substanzen.

**Achtung: Brausetablette weder oral noch vaginal einführen!**

**Können Multi-Gyn Brausetabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden?**  
Multi-Gyn Brausetabletten können während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Alleinvertreib in Deutschland:  
Ardo medical GmbH,  
D-82234, Oberpfaffenhofen



Hergestellt von:  
BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ, Delft, Niederlande

WWW.MULTI-GYN.DE



05-2013  
AG1301.7

## **Multi-Gyn ist eine Serie natürlicher Produkte zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Beschwerden im Intimbereich.**

Bio-aktive Multi-Gyn Produkte nehmen eine interessante Stellung in der persönlichen Intimpflege und natürlichen Selbstmedikation ein. Multi-Gyn Produkte enthalten weder aggressive Chemikalien noch Bestandteile tierischen Ursprungs.

Sie sind zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet und besitzen keine bekannten Wechselwirkungen mit Arzneimitteln.

### **Weitere Multi-Gyn Produkte für den Intimbereich:**

#### **Multi-Gyn FemiWash**

Bio-aktiver Mikroschaum für die tägliche Hygiene. Milde und seifenfreie Intimwaschlotion für das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich. Auch zur Intimirasur geeignet. 100ml, PZN: 04952660

#### **Multi-Gyn LiquiGel**

Bio-aktives Pflegegel für Wohlbefinden im Intimbereich. Lindert Trockenheit und Irritationen. 30ml, PZN: 09732443

#### **Multi-Gyn FloraPlus**

Bio-aktives, prebiotisches Vaginalgel zur Vorbeugung und Behandlung von Scheidenpilzproblemen. Fördert aktiv die körpereigenen Milchsäurebakterien. In praktischen Einzel-Applikatoren, 5 x 5ml, PZN: 06916208

#### **Multi-Gyn ActiGel**

Bio-aktives Gel zur Vorbeugung und Behandlung von bakterieller Vaginose und den damit zusammenhängenden Problemen wie Ausfluss, Geruch, Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, Rötungen und Wundheit. 50ml, PZN: 04952648

#### **Multi-Gyn Kompressen**

Kompressen mit bio-aktivem Gel bei äußeren Beschwerden im Intimbereich (Damm, Vulva, Schamlippen und Anus) wie Gewebeschäden, Juckreiz, Empfindlichkeit, Reizungen oder Schwellungen. 12 Einzelkompressen, PZN: 04867635

Multi-Gyn Produkte sind in jeder Apotheke erhältlich

### **Weitere Informationen unter [www.multi-gyn.de](http://www.multi-gyn.de)**

Alleinvertrieb in Deutschland:

Ardo medical GmbH

Argelsrieder Feld 10

D-82234 Oberpfaffenhofen

Tel. 08153 / 90 877 - 0

Fax. 08153 / 90 877 - 66

[info@ardomedical.de](mailto:info@ardomedical.de)

[www.ardomedical.de](http://www.ardomedical.de)



# ARDO